

# Så här tar du snabbtest från



1.



Ta av smycken och sprita händerna.

2.



Lägg fram alla delar du behöver:

- Testplatta
- Bomullspinne
- Provrör med lösning
- Spets till provrör

**OBS!** Kontrollpinnarna ska INTE användas vid test! Släng dem så att de inte används av misstag.



3.



Ta ut testplattan ur förpackningen.


4.



Ta ut pinnen ur förpackningen.

## 3-4 varv per näsborre

5.

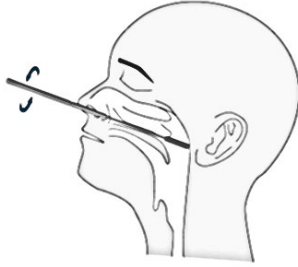

För försiktigt in pinnen långt bak i näsan och rotera den 3-4 varv i varje näsborre.

## minst 5 varv

6.



- Dra av skyddslocket på provröret försiktigt så inte vätskan rinner ut.
- Sätt ner pinnen och kläm ihop röret.
- Rör runt pinnen minst fem varv.

7.



- Fortsätt klämma ihop provröret medan du försiktigt drar ut bomullspinnen.
- Släng pinnen direkt.


8.



Tryck fast spetsen på provröret.

9.

3 droppar

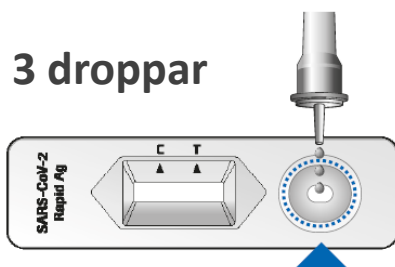

Håll provröret rakt och droppa tre droppar i hålet på testplattan.

10.


15 min



Vänta 15 minuter på provsvar.  
Gå och tvätta händerna under tiden.

OBS! Test som avläses senare än  
30 minuter efter kan visa felresultat!


11.

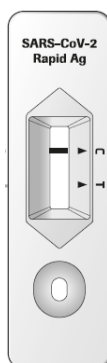

Om du bara ser ett streck överst är provsvaret **NEGATIVT**. Det betyder att du inte har covid-19. Grattis!

**KOM IHÅG** att registrera provsvaret via  
[etjanst.molndal.se/snabbtest](https://etjanst.molndal.se/snabbtest)

12.

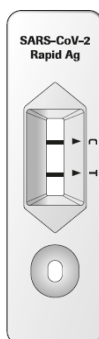

Om du ser två streck, tydligt eller svagt, är svaret **POSITIVT**. Det betyder att du har covid-19.

Lämna byggnaden och kontakta din chef.

**Är du besökare?**

Kontakta personalen innan du lämnar byggnaden.